

家庭用補助手すり

屋内専用

スタンバーZ

スタンバーZ

型式
SBZシリーズ


取扱説明書

- この説明書には下記のマークをつけています。
 拡大損害が予想される項目には・・・ ⚠
 禁止行為には・・・ ⚡
 特によく読んでいただきたい事項には・・・ ⚠
 おすすめしたい項目には・・・ ☺
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

このたびは、「スタンバーZ（ゼット）」をお買い求めいただきありがとうございます。この商品は立ち上がりや座り込みの際に置くだけで使用できる家庭用補助手すりです。ご使用前にこの説明書をよく読んで、正しく安全にお使いください。

安全上のお知らせ
 この製品の設計寿命は販売後5年です。詳しくは保証規定をお読みください。

【各部の名称】

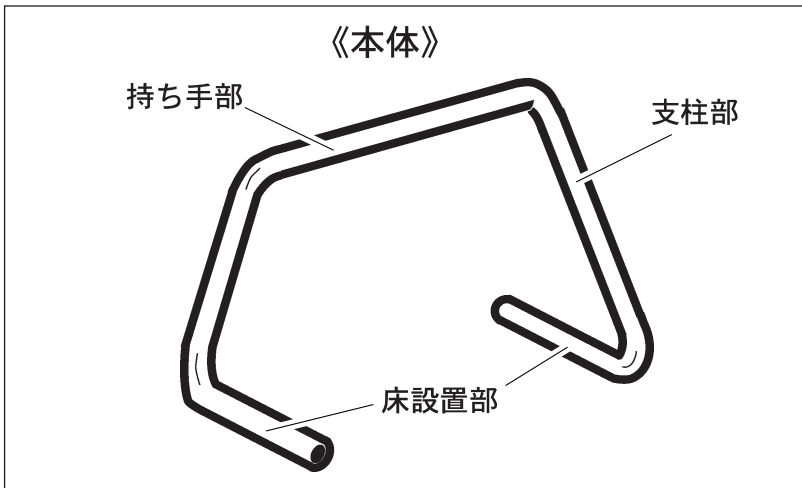

耐荷重：
1150N (120kg)



■ご使用前に・・・よく読んで正しく安全にご使用ください。


⚠ 警告 重大な事故の原因になります。

- 不安定な状態で無理に体重をかけないでください。転倒の原因となります。



⚠ 注意 ケガや本体損傷の原因になります。

- 火気に近づけないでください。
- 本書記載以外の使用方法・用途では使用しないでください。
- 窓際などで長時間直射日光に当てないでください。色あせなどの原因になります。

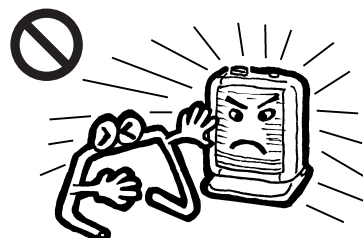

使用方法



浴室など滑りやすい場所では
使用しないでください。
転倒の原因となります。

1. 床設置部を安定した床面に置きます。
2. 持ち手部を両手で持ち、スタンバーを身体と平行に向き合うように調整します。
3. スタンバーの内側にひざを入れます。
4. 持ち手部を両手でしっかり握ります。
5. ゆっくりと体重をかけ、立ち上がり（座り）ます。



必ずスタンバーの内側に
ひざを入れてください。



前後への転倒に
ご注意ください。

お手入れ方法

汚れが気になりましたら、かたくしぼった布で
拭き取ってください。




しつこい汚れには、薄めた
中性洗剤をご使用ください。




注意

シンナー・ベンジン
などは使用できません。

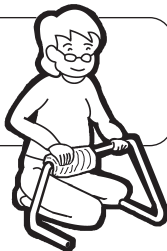

両手で握って
ください。

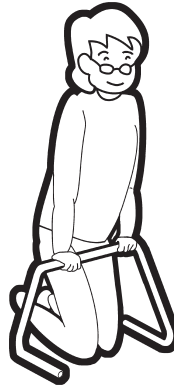


持ち手部にバランス
よく、均等に力を
かけるようにします。



立つ時

座る時

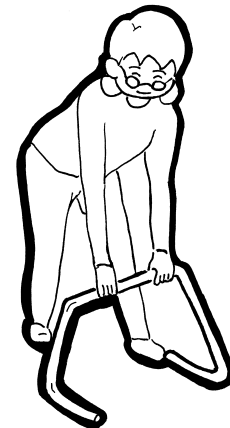

保証規定

保証期間：お買い上げ日より6ヶ月

この保証規定は、本書記載内容に基づく正常な使用において本体に不具合が発生した場合、お買い上げ後の保証期間内であれば、無償で修理又は交換をお約束するものです。但し次の場合は期間内においても有償となります。

- (1) 本書記載以外の使用や禁止行為等に起因するもの。
- (2) 火災や地震等の災害によるもの。
- (3) お買い上げ後の落下・輸送による損傷。
- (4) 使用による外観や本体各部の消耗及び損傷。
- (5) リサイクル業者や使用者等による再販、及び当社の責任範囲を超える場合等。
- (6) 当社以外による修理等。
- (7) 日本国外での使用。
- (8) レシートと本書の提示のない場合。

※当社以外による修理・再販などについては、保証期間内でも保証対象外です。

この製品の寿命について

この製品は下記の条件で寿命を設定しています。

- 設計寿命5年：（設計時に決めている寿命です）
- 期待寿命2年：（本書記載の使用状況下で、設定された適切な当該製品の寿命です）

仕様

品名：スタンバーZ
型式：SBZシリーズ
用途：家庭用補助手すり
材質：スチールパイプ、ゴム被覆、ポリエチレンキャップ
耐荷重：1150N(120kg)
重量：約1.8kg
寸法：約(幅)570×(奥行)330×(高さ)420mm、
直径32mm(パイプ径22mm)
原産国：台湾製(企画・開発：日本)

※上記仕様などは改良のため、予告なく変更する場合があります。

発売元 ミライズ株式会社

〒565-0862 大阪府吹田市津雲台4丁目1-11
TEL：06-6836-2888 FAX：06-6836-2861

URL：http://www.e-tesuri.com/
e-mail：info@e-tesuri.com